


MASQUE À PLIS

pas à pas #Diy



DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Facile, connaissance de base
d'une machine à coudre.

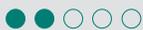

TEMPS DE RÉALISATION

Environ 1 heure



VALEUR DE COUTURE INCLUDE

1 cm (3/8 po)

MATÉRIEL REQUIS

PETIT :

Coton extérieur : 15 cm (6 po) (permettra de faire 5 masques dans une largeur de 112 cm (44 po))

Doublure de coton Kona ou de mousseline premium : 15 cm (6 po)
(permettra de faire 8 masques dans une largeur de 112 cm (44 po))

Attaches

Option ruban : 1 m 30 (51 ¼ po) de ruban

Option élastique derrière les oreilles : 36 cm (14 ¼ po) d'élastique

Option élastique derrière la tête : 45 cm (17 ¾ po)

Tige de métal : 8 cm (3 po) ou bande nasale pré-coupée de 9 cm (3 1/2 po)

ou

MOYEN :

Coton extérieur : 20 cm (8 po) (permettra de faire 4 masques dans une largeur de 112 cm (44 po))

Doublure de coton Kona ou de mousseline premium : 20 cm (10 po)
(permettra de faire 5 masques dans une largeur de 112 cm (44 po))

Attaches

Option ruban : 2 m (78 ¾ po) de ruban

Option élastique derrière les oreilles : 44 cm (17 ¼ po) d'élastique

Option élastique derrière la tête : 60 cm (23 5/8 po) d'élastique

Tige de métal : 12 cm (4 ¾ po) ou bande nasale pré-coupée de 9 cm (3 1/2 po)

ou

GRAND :

Coton extérieur : 25 cm (10 po) (permettra de faire 4 masques dans une largeur de 112 cm (44 po))

Doublure de coton Kona ou de mousseline premium : 25 cm (10 po)
(permettra de faire 5 masques dans une largeur de 112 cm (44 po))

Attaches

Option ruban : 2 m (78 ¾ po) de ruban

Option élastique derrière les oreilles : 50 cm (19 ¾ po) d'élastique

Option élastique derrière la tête : 70 cm (27 ½ po) d'élastique

Tige de métal : 13 cm (5 po) ou bande nasale pré-coupée de 9 cm (3 1/2 po)

LISTE DE TAILLAGE

- 1 fois dans le tissu extérieur
- 1 fois dans la doublure
- 2 passants
- Rubans de 6 mm ou 10 mm ou élastique selon le choix d'option d'attache

Facultatif : Une tige d'aluminium ou de cuivre de 1-3 mm coupé selon la charte. Replier à l'aide d'une pince chaque extrémité pour arrondir les bouts.

Facultatif : surjeter tous les côtés de chacune des pièces avant de commencer.

	Tige de métal	Options d'attache		
		Ruban	Élastique derrière les oreilles	Élastique derrière la tête
Petit	8 cm (3 po) ou bande nasale pré-coupée de 9 cm (3 1/2 po)	2 x 65 cm (25 1/2 po)	2 x 18 cm (7 po)	45 cm (17 3/4 po)
Moyen	12 cm (4 3/4 po) ou bande nasale pré-coupée de 9 cm (3 1/2 po)	2 x 1 m (40 po)	2 x 22 cm (8 3/4 po)	60 cm (23 5/8 po)
Grand	13 cm (5 po) ou bande nasale pré-coupée de 9 cm (3 1/2 po)	2 x 1 m (40 po)	2 x 25 cm (10 po)	70 cm (27 1/2 po)

Suivez les étapes de confection de ce masque en vidéo sur notre blogue :

clubtissus.com/blog/masques

ÉTAPES

Valeur de couture de 1 cm (3/8 po) incluse.

- 1-** Transférer tous les repères du patron sur le tissu à l'aide d'un crayon effaçable pour tissus.
 - 2-** Coudre endroit sur endroit le haut du masque. Le haut du masque est le long côté sans crans.
 - 3 -** Presser la valeur de couture ouverte.
 - 4-** Retourner l'ourlet du bas sur 1 cm (3/8 po) et réaliser une surpiqûre à 6 mm (1/4 po) du bord afin de faire un ourlet. Réaliser cette étape sur le tissu extérieur et sur la doublure.
 - 5-** Replier le tissu extérieur et la doublure endroit sur endroit et coudre le bas du masque en laissant une ouverture entre les crans. Faire un point d'arrêt à chacun des crans. Pour l'option sans tige de métal, sauter à l'étape 8.
 - 6-** Retourner sur l'endroit. Dans le haut du masque, sur la longueur où la couture est complète, coudre une surpiqûre à 1 cm (3/8 po) afin de réaliser un passant.
 - 7-** Insérer la tige de métal dans le passant et réaliser une Bar Tak de chaque côté de la tige de métal.
 - 8-** Réaliser les plis plats dans le sens des flèches et en suivant les crans sur le patron. Les plis seront dirigés vers le bas. Faire une couture de soutien sur les côtés pour les maintenir en place.
 - 9-** Si vous ne souhaitez pas laisser une ouverture dans le bas du masque destiné à l'insertion d'un filtre amovible, vous pouvez fermer l'ouverture à l'aide d'une couture à 6 mm (1/4 po) du bord.
 - 10-** Tourner les deux plus petites extrémités de la pièce du passant sur 1 cm (3/8 po) et piquer afin de coudre les ourlets à environ 6 mm (1/4 po).
 - 11-** Endroit sur endroit, sur l'extérieur, positionner la pièce du passant sur chaque extrémité du masque et coudre à 1 cm (3/8 po).
 - 12-** Replier sur 1 cm (3/8 po) le long côté opposé du passant et replier pour rejoindre le bord de la dernière couture sur l'envers du masque.
 - 13-** Réaliser une surpiqûre afin de fermer le passant.
 - 14-** Option Ruban : Insérer les rubans dans les passants. Si votre ruban s'effiloche, faire un petit nœud sur chaque extrémité des rubans ou faire un petit ourlet.
- Option élastique derrière les oreilles : Couper deux morceaux d'élastiques selon la charte. Insérer un élastique dans le passant et coudre les deux extrémités de l'élastique. Cacher la couture de l'élastique à l'intérieur du passant. Répéter pour le second passant.
- Option élastique derrière la tête : Couper un morceau d'élastique selon la charte. Insérer un bout de l'élastique de bas en haut dans le premier passant. Faire redescendre ce même côté d'élastique dans le second passant de haut en bas. Coudre les deux extrémités de l'élastique. Cacher la couture de l'élastique à l'intérieur d'un passant.
- Astuce : Si vous n'obtenez pas un ajustement parfait des élastiques du premier coup, ajouter une mesure de 10 cm aux élastiques vous permettra de faire un nœud et ainsi obtenir une longueur sur mesure convenant parfaitement à votre tête. Vous pourrez ensuite soit noter la longueur pour vos futurs masques, soit simplement couper l'excédent et ensuite cacher le nœud à l'intérieur du passant. La forme de votre tête, ainsi que la souplesse des élastiques peut faire varier la mesure.
- 15-** Placer le masque sur votre visage et ajuster les rubans en fronçant les passants, si nécessaire, pour bien ajuster sur les joues et le menton. Si le ruban est glissant, une fois que le masque sera ajusté, faire un petit point de couture sur les deux extrémités des passants à travers toutes les épaisseurs.

MISES EN GARDE!

L'usage d'un masque ne remplace pas les consignes sanitaires approuvées par le gouvernement. Un masque mal utilisé pourrait s'avérer inefficace.

Le port d'un masque artisanal ne remplace pas ces mesures pour réduire les risques de propagation de la COVID-19 :


**Le lavage de main
La distanciation sociale
Tousser dans son coude
Rester à la maison autant que possible**

Consultez les consignes sanitaires du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada pour tous les détails.

Psst.

Nous adorons voir
vos créations !
Partagez-les en
utilisant le **#clubtissus**

Test
Carré de
1 po
(2.54cm)

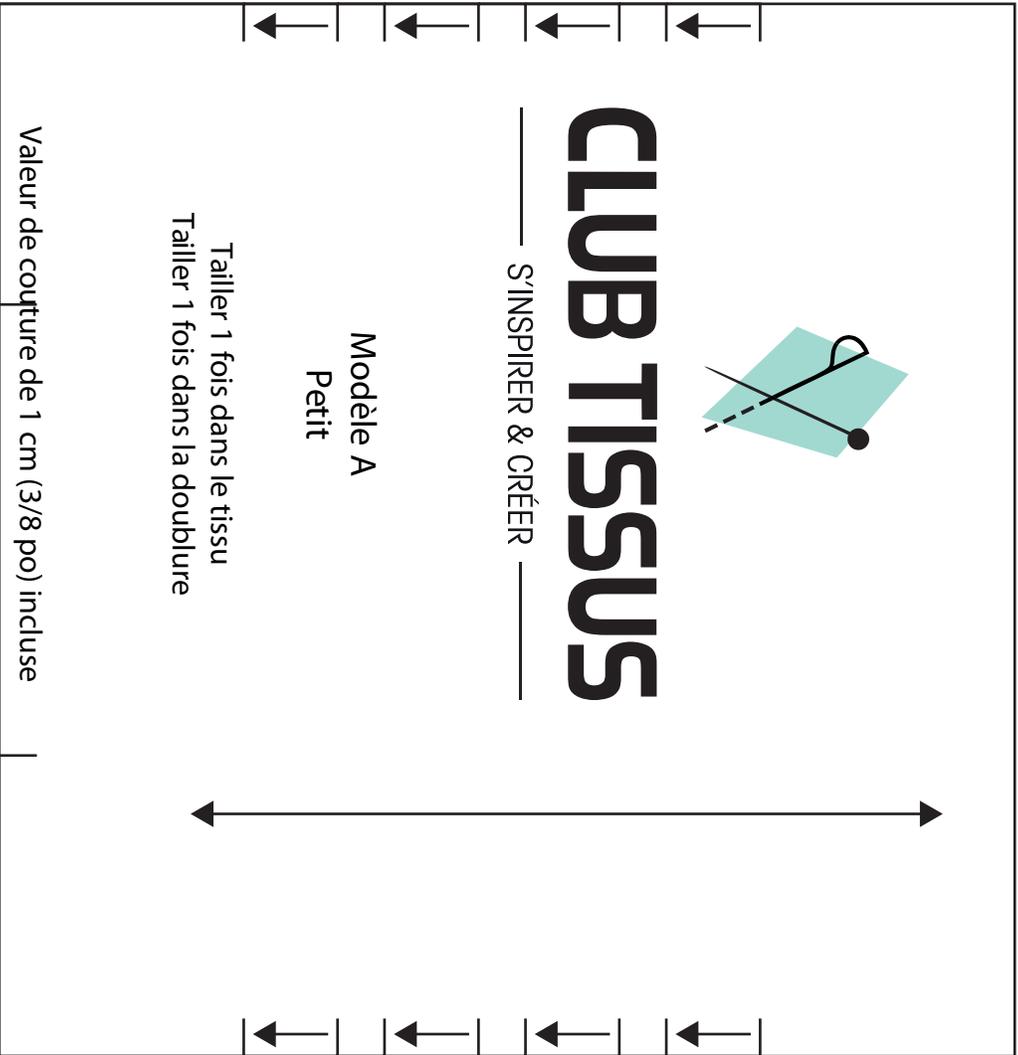

Test
Carré de
1 po
(2.54cm)




CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Modèle A
Moyen

Tailler 1 fois dans le tissu
Tailler 1 fois dans la doublure

Valeur de couture de 1 cm (3/8 po) incluse

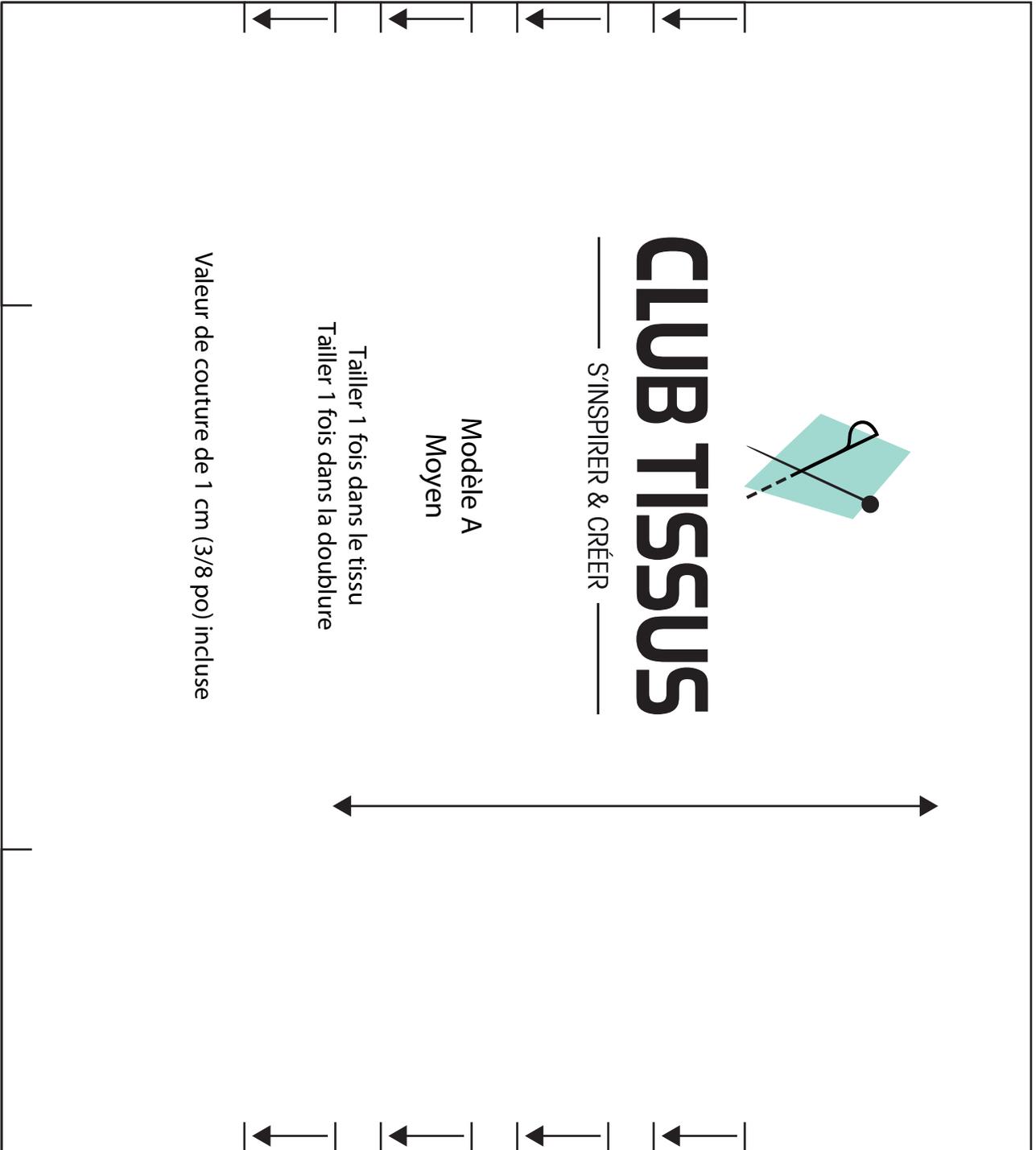

Test
Carré de
1 po
(2.54cm)




CLUB TISSUS

— S'INSPIRER & CRÉER —

Modèle A
Grand

Tailler 1 fois dans le tissu
Tailler 1 fois dans la doublure

Valeur de couture de 1 cm (3/8 po) incluse

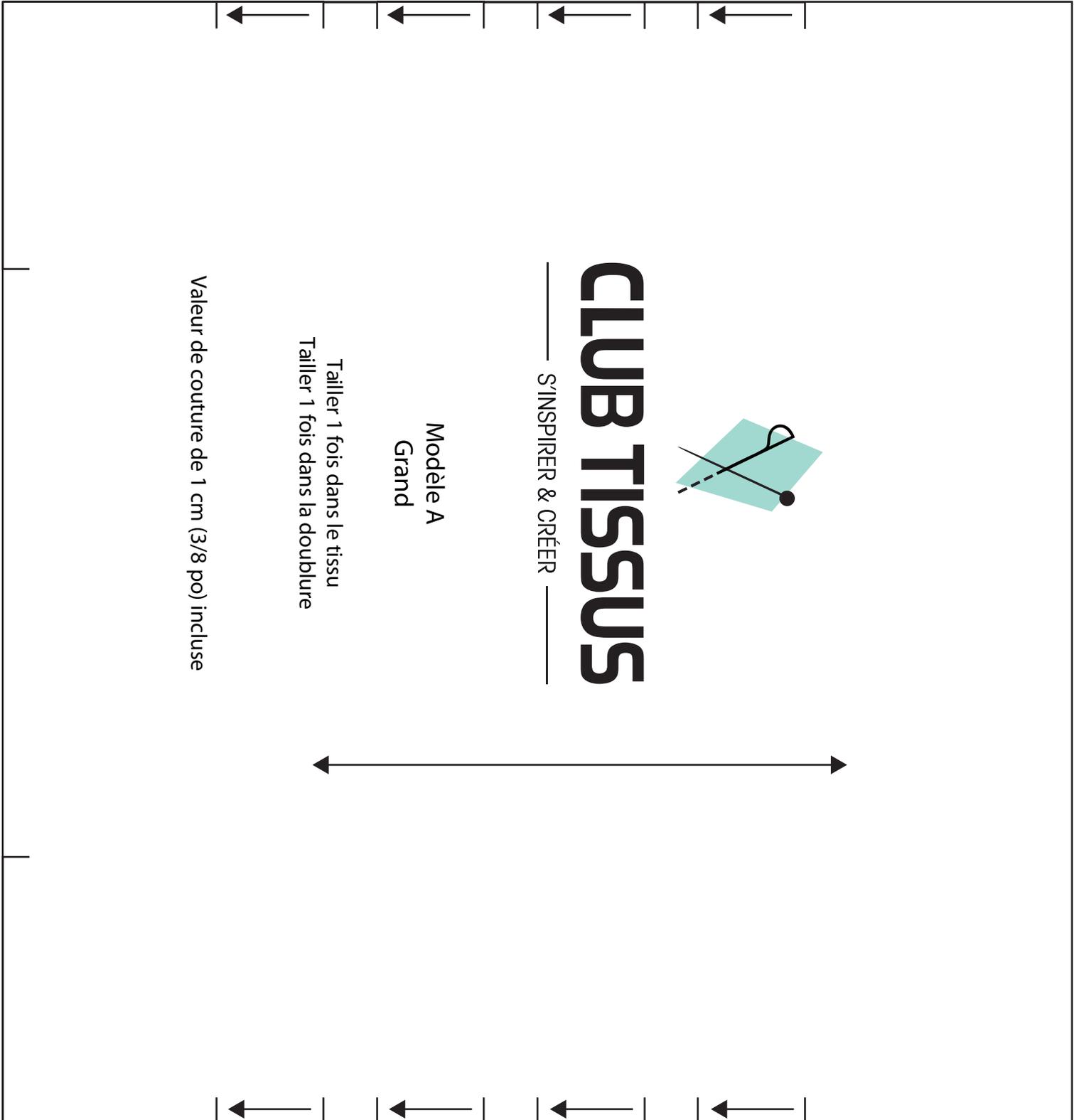

Test
Carré de
1 po
(2.54cm)



CLUB TISSUS
— S'INSPIRER & CRÉER —

Modèle A
Grand

Passant

Tailler 2 fois dans le tissu

Valeur de couture de
1 cm (3/8 po)
incluse



CLUB TISSUS
— S'INSPIRER & CRÉER —

Modèle A
Moyen

Passant

Tailler 2 fois dans le tissu

Valeur de couture de
1 cm (3/8 po)
incluse



CLUB TISSUS
— S'INSPIRER & CRÉER —

Modèle A
Petit

Passant

Tailler 2 fois dans le tissu

Valeur de couture de
1 cm (3/8 po)
incluse